

Smile Line ☺


SDC

SOCIÉTÉ DES CENDRES

DEPUIS 1859

SMILE LITE MDP2

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

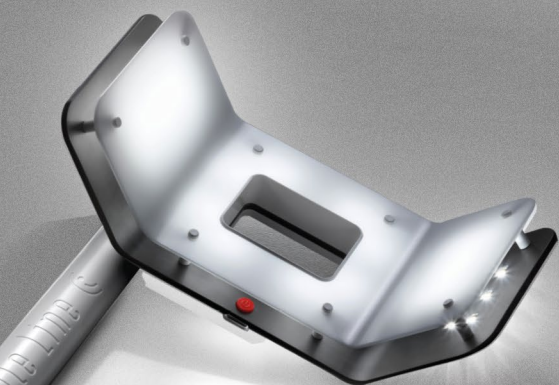

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA PHOTOGRAPHIE DENTAIRE




SMILE LITE MDP2

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

Smile Lite MDP2 est un appareil « plug & play » très facile d'emploi qui ne nécessite ni app spéciale, ni calibration ou éducation spécifique. Elle vous permet d'améliorer de manière spectaculaire la qualité de vos images prises avec votre smartphone.... un vrai jeu d'enfant !

Très rapidement elle va devenir un accessoire indispensable pour vous :

- Photos pour prises de teintes
- Communication quotidienne avec le laboratoire
- Communication avec les patients
- Petits clips vidéo
- Documentation
- Images artistiques

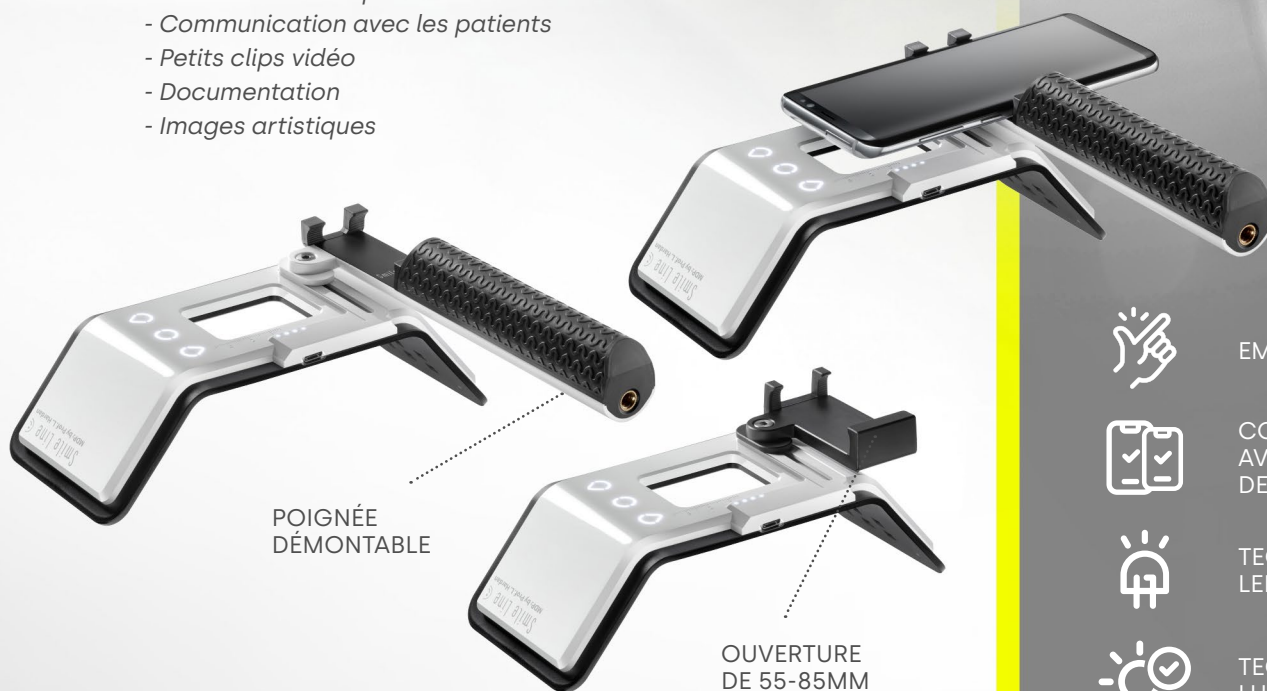

POIGNÉE
DÉMONTABLE

OUVERTURE
DE 55-85MM

La Smile Lite MDP2 peut être comparée à un mini studio photo. Elle est équipée de trois groupes de LEDs (Light Emitting Diodes) : chaque groupe peut être allumé individuellement. Quatre niveaux d'illumination sont possible.

Le dos de la Smile Lite MDP2 est équipé d'un adaptateur universel qui convient à la grande majorité des smartphones dont la largeur est entre 55-85mm.



EMPLOI FACILE



COMPATIBILITÉ
AVEC LA MAJORITÉ
DES SMARTPHONES



TECHNOLOGIE
LEDs



TECHNOLOGIE
LUMIÈRE DU JOUR



4 NIVEAUX
DE PUISSANCE




RECHARGEABLE
VIA USB-C



FIXATION
MAGNÉTIQUE



POIDS PLUME

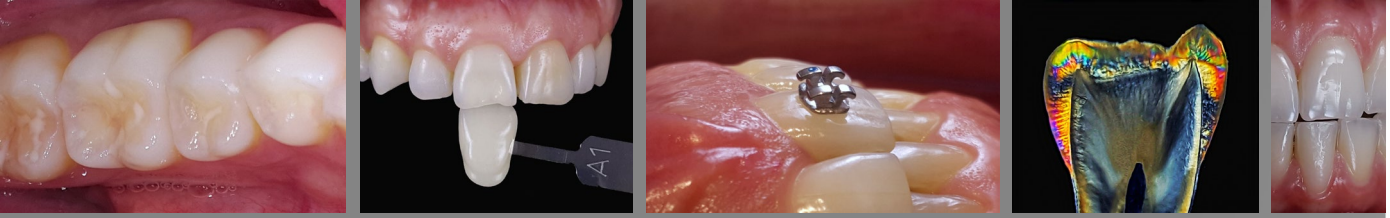

FACILE. INSTANTANÉ.

ACCESSOIRES

Accessoires recommandés pour une version « toutes options » de votre Smile Lite MDP2 :



Diffuseur


Idéal pour adoucir la lumière et mettre en évidence les textures.




Filtre polarisant

Permet d'éliminer les reflets de lumière.
Améliore la compréhension de la teinte et de la valeur.
Augmente la perception des caractérisations internes de la dent.


EXEMPLES DES POSSIBILITÉS SPECTACULAIRES DE SMILE LITE MDP2 AVEC UN SMARTPHONE :

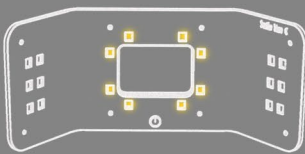


LEDs centrales allumées à pleine puissance, LEDs latérales éteintes

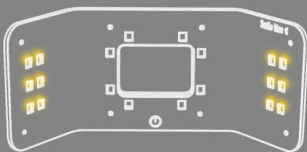

LEDs latérales allumées à pleine puissance, LEDs centrales éteintes

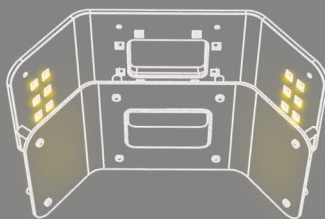

LEDs latérales allumées à pleine puissance + diffuseur, LEDs centrales éteintes

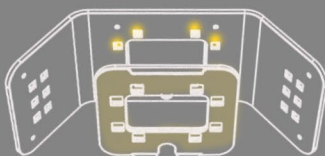

LEDs centrales allumées à pleine puissance + filtre polarisant, LEDs latérales éteintes



Faites confiance à la caméra de votre smartphone, attachez-y votre Smile Lite MDP2 et commencez à explorer les incroyables possibilités offertes pour la photographie dentaire !

Chers collègues et amis,

En 2017, après 5 années de longues recherches et développement avec Smile Line et Styleitaliano, la Smile Lite MDP a fait son entrée sur le marché. Le succès a été immédiat et phénoménal, des praticiens du monde entier l'ont intégrée dans leur pratique quotidienne, de nombreuses conférences et workshops ont été organisés partout dans le monde y compris dans des universités très réputées.

La documentation des cas est capitale, et pourtant pour 90% des praticiens ceci constitue un problème. D'une part les appareils réflex numériques sont complexe à utiliser, d'autre part tout le protocole est relativement lourd et lent – sans parler de l'investissement élevé que représente un tel équipement et qui sera un frein.

Smile Lite MDP a représenté la solution facile d'accès pour un nombre important de dentistes et d'étudiant grâce à sa facilité d'utilisation, son côté immédiat, son confort, son poids et finalement son coût accessible. Son succès provient sans doute aussi du fait qu'il s'agit d'un accessoire développé par un dentiste pour les dentistes.

Après 5 ans de succès sur le marché, je suis fier et ravi de vous présenter la nouvelle Smile Lite MDP2 qui offre un design plus moderne, léger et fin, qui intègre une poignée ergonomique et qui utilise des LEDs de la toute dernière génération.

La Smile Lite MDP2 est complètement en ligne avec la philosophie de sa précurseur qui est de proposer un mini studio photo avec groupes de LEDs indépendants, avec la possibilité d'utiliser un diffuseur de lumière (aujourd'hui sur toutes les LEDs) ou encore de prendre des photos polarisées grâce à un filtre spécial placé sur les LEDs centrales.

Le secret pour de bonnes images est la gestion de la lumière et votre Smile Lite MDP2 vous offre toutes les possibilités pour les photos intra orales ou photos de portraits. Des images de qualité sont capitales dans notre pratique quotidienne non seulement pour documenter des cas mais également pour améliorer la communication avec le laboratoire et avec nos patients.

Vous découvrirez sur ce flyer divers exemples d'images que vous serez à même de prendre avec votre smartphone monté sur votre Smile Lite MDP2.

En vous souhaitant beaucoup de plaisir dans votre découverte des possibilités inouïes offertes par le monde de la MDP !

Cordialement,

Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Head Of Department Restorative and Esthetic Dentistry
Saint-Joseph University, Beirut



Smile Line ☺



SDC - Société des Cendres
13, rue du Général Mocquery
37 550 ST AVERTIN-France
01 49 61 41 41 - info@sdc.fr - www.sdc.fr

Description	N° d'article
SMILE LITE MDP2 MASTER SET (image)	#6700-MASTER
SMILE LITE MDP2 BASIC SET (sans pola / diffuseur)	#6700-BASIC